


instrukcja użycia


Przed użyciem należy uważnie sprawdzić wszystkie części, zawory i otwory. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek wady produkt należy wymienić na nowy.



1

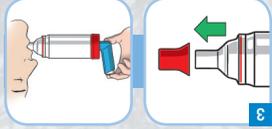

3

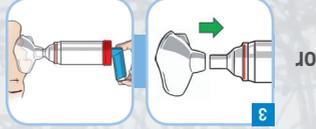

OR

3



Vision valve



OR

4



4

Zdjąć zatyczkę z inhalatora MDI (Metered Dose Inhaler). Potrząsnąć (Mieć) zgodnie z jego instrukcją. Włożyć szczelną MDI do uniwersalnego adaptera "Proper Fit".



2

ustnik, LUB
Zgodnie z potrzebami pacjenta można włożyć Fasio (NIE ZAŁĄCZONA) w końcówkę ustnika komory. Sprawdzić, czy zawór bezpieczeństwa maski otwiera się (jeśli nie, maskę należy wymienić na nową). Przyłożyć maskę do twarzy. Sprawdzić, czy maska ściśle przylega do twarzy.

Normalnie wdychać i wydechować powtórnie. Następnie jednokrotnie nacisnąć MDI i zacząć powoli wdychać powietrze. Uważnie obserwować zawór VISION VALVE, jego ruch świadczy o prawidłowej inhalacji.

Upewnić się, że ustnik jest szczelnie objęty ustami (lub maska ściśle przylega do twarzy) i wykonać przynajmniej 5 wdechów po naciśnięciu MDI. Po każdym dozowaniu przyszywać przynajmniej na 5 sekund wdech aby pozwolić lekowi na depozycję w płucach.
Poczekaj przed uwołnieniem kolejnej dawki leku i powtórz ten krok zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z instrukcją użycia MDI. Zawsze przestrzegaj przepisanej dawki.

instrukcja czyszczenia


Wyczyścić przed pierwszym użyciem, a następnie przynajmniej raz w tygodniu zgodnie z instrukcją.

Moczyć części przez 15 minut w letniej, czystej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu.
Poruszać delikatnie



2

Otworzyć komorę jak pokazano i zdemontować części.

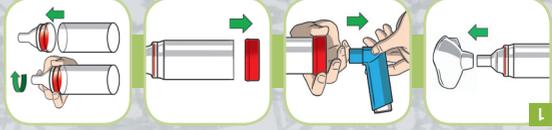

1

OSTRZEŻENIA

Pośpować zgodnie z instrukcją przed każdym użyciem. Nie pozostawiać Fasio Chamber Vision lub jego części w zasięgu dzieci bez nadzoru, ponieważ kilka elementów jest na tyle małych, że mogą być pokłnięte. Produkt jest przeznaczony do stosowania przez jednego pacjenta. Aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia nie stosować u innych pacjentów, częstym użyciem, stan produktu zawiór, jest zniszczony wariantami środowiskowymi, przechowywaniem, częstym użyciem, stan produktu odbiega od stanu pierwotnego. Zulfizować zgodnie z przepisami.

Komora Inhalacyjna Fasio Chamber Vision jest sprzedawana i stosowana na polecenie lekarza. Należy nadzorować pacjenta podczas użycia.



- A Analityczna komora
- B Zawór wdechowy Vision Valve
- C Uniwersalny adapter "Proper Fit" z zaworami spiralnego ruchu powietrza
- D Zawór wydechowy (NIE OTWIERAĆ)

Temperatura przechowywania: -10° / +45°C
Wilgotność względna: 30% / 80%

Przemyc części pod bieżącą wodą. Otrząsnąć z wody i pozostawić do wyschnięcia. Nie używać do osuszania ściereczek. Upewnić się przed ponownym złożeniem, że wszystkie części są suche. Złożyć części jak pokazano i przechowywać złożoną komorę w suchym, czystym opakowaniu.