




instrukcja użycia

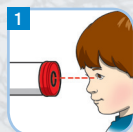

1 Przed użyciem należy uważnie sprawdzić wszystkie części, zawory i otwory. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek wady produkt należy wymienić na nowy.

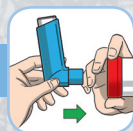

2 Zjąć zatyczkę z inhalatora MDI (Metered Dose Inhaler). Potrząsnąć MDI zgodnie z jego instrukcją. Włożyć szczelnie MDI do uniwersalnego adaptera "Proper Fit".

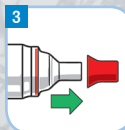

or



Zdjąć zatyczkę z komory.

Należyc maskę Fisio Mask na ustnik komory. Sprawdzić, czy zawór bezpieczeństwa maski otwiera się (jeśli nie, maskę należy wymienić na nową).

Założyć maskę na twarz. Sprawdzić, czy szczelnie przylega.

lub

Jeśli pacjent może współpracować włożyć usta w końcówkę ustnika i sprawdzić, czy usta szczelnie obejmują ustnik.

Normalnie wdychać i wydychać powietrze.

Następnie jednokrotnie nacisnąć inhalator MDI i zacząć powoli wdychać powietrze. Uważnie obserwować zawór VISION VALVE, jego ruch świadczy o prawidłowej inhalacji..

Utrzymywać ściśle ustnik (lub maskę) i wykonać przynajmniej 5 wdechów po naciśnięciu MDI. Począć przed uwolnieniem kolejnej dawki i powtórzyć ten krok zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z instrukcją użycia. Zawsze przestrzegać przepisanej dawki.

OSTRZEŻENIA

Postępować zgodnie z instrukcją przed każdym użyciem. Nie pozostawiać Fisio Chamber Vision lub jego części w zasięgu dzieci bez nadzoru, ponieważ kilka elementów jest na tyle małych, że mogą być połknięte. Produkt jest przeznaczony do stosowania przez jednego pacjenta.





Aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia nie stosować u innych pacjentów. Produkt powinien być wymieniony po maksymalnie 2 latach ciągłego używania. Wymienić produkt jeżeli jest uszkodzony, ma nieszczelny zawór, jest zniszczony warunkami środowiskowymi, przechowywaniem, częstym używaniem, stan produktu odbiega od stanu pierwotnego.

Zużyłować zgodnie z przepisami.


Komora inhalacyjna Fisio Chamber Vision jest sprzedawana i stosowana na polecenie lekarza. Należy nadzorować pacjenta podczas używania.

instrukcja czyszczenia

Wyczyścić przed pierwszym użyciem, a następnie przynajmniej raz w tygodniu zgodnie z instrukcją.

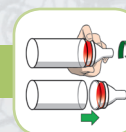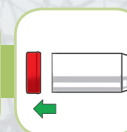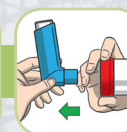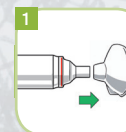

Otworzyć komorę jak pokazano i zdemontować części.

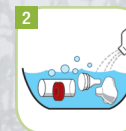

Moczyć części przez 15 minut w letniej, czystej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Poruszać delikatnie.

Przemyć części pod bieżącą wodą.




Otrząsnąć z wody i pozostawić do wyschnięcia.

Nie używać do osuszania ściereczek. Upewnić się przed ponownym złożeniem, że wszystkie części są suche. Złożyć części jak pokazano i przechowywać złożoną komorę w suchym, czystym opakowaniu.

Złożyć części jak pokazano i przechowywać złożoną komorę w suchym, czystym opakowaniu.

Temperatura przechowywania: -10° / +45°C

Wilgotność względna: 30% / 80%

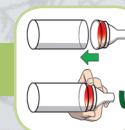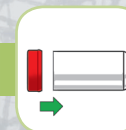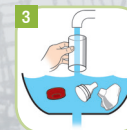

- A Antystatyczna komora
- B Zawór wdechowy Vision Valve
- C Uniwersalny adapter "Proper Fit" z zaworami spiralnego ruchu powietrza
- D Zawór wydechowy (NIE OTWIERAĆ)
- E Wygodna i przylegająca Maska z bezpiecznym wydechowym zaworem

