



instrukcja użycia

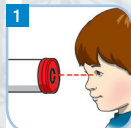

1 Przed użyciem należy uważnie sprawdzić wszystkie części, zawory i otwory. W razie stwierdzenia jakiegokolwiek wady produkt należy wymienić na nowy.

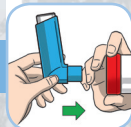


2 Zdjąć zatyczkę z inhalatora MDI (Metered Dose Inhaler). Potrząsnąć MDI zgodnie z jego instrukcją. Włożyć szczelnie MDI do uniwersalnego adaptera "Proper Fit".



3 Zdjąć zatyczkę z komory.

Naćisnąć maskę Fisio Mask na ustnik komory. Sprawdzić, czy zawór bezpieczeństwa maski otwiera się (jeśli nie, maskę należy wymienić na nową). Założyć maskę na twarz. Sprawdzić, czy szczelnie przylega.

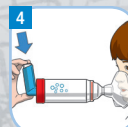

4 Normalnie wdychać i wydychać powietrze. Następnie jednokrotnie nacisnąć inhalator MDI i zacząć powoli wdychać powietrze. Uważnie obserwować zawór VISION VALVE, jego ruch świadczy o prawidłowej inhalacji.. Utrzymywać ściśle maskę i wykonać przynajmniej 5 wdechów po naciśnięciu MDI. Poczekać przed uwolnieniem kolejnej dawki i powtórzyć ten krok zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z instrukcją użycia. Zawsze przestrzegać przepisanej dawki.



OSTRZEŻENIA

Postępować zgodnie z instrukcją przed każdym użyciem. Nie pozostawiać Fisio Chamber Vision lub jego części w zasięgu dzieci bez nadzoru, ponieważ kilka elementów jest na tyle małych, że mogą być połknięte. Produkt jest przeznaczony do stosowania przez jednego pacjenta. Aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia nie stosować u innych pacjentów. Produkt powinien być wymieniony po maksymalnie 2 latach ciągłego używania. Wymienić produkt jeżeli jest uszkodzony, ma nieszczelny zawór, jest zniszczony warunkami środowiskowymi, przechowywaniem, częstym używaniem, stan produktu odbiega od stanu pierwotnego. Zutyliзовать zgodnie z przepisami.


Komora inhalacyjna Fisio Chamber Vision jest sprzedawana i stosowana na polecenie lekarza. Należy nadzorować pacjenta podczas używania.

instrukcja czyszczenia




Wyczyścić przed pierwszym użyciem, a następnie przynajmniej raz w tygodniu zgodnie z instrukcją.

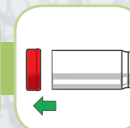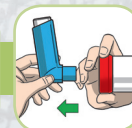

Otworzyć komorę ak pokazano i zdemonować części.

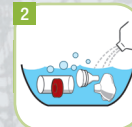

Moczyć części przez 15 minut w letniej, czystej wodzie z dodatkiem łagodnego detergentu. Poruszać delikatnie.

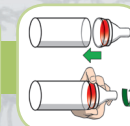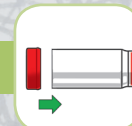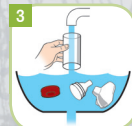

Przemycić części pod bieżącą wodą. Otrząsnąć z wody i pozostawić do wyschnięcia. Nie używać do osuszania ściereczek. Upewnić się przed ponownym złożeniem, że wszystkie części są suche. Złożyć części jak pokazano i przechowywać złożoną komorę w suchym, czystym opakowaniu. Złożyć części jak pokazano i przechowywać złożoną komorę w suchym, czystym opakowaniu.

Temperatura przechowywania: -10° / +45°C
Wilgotność względna: 30% / 80%



- A Antystatyczna komora
- B Zawór wdechowy Vision Valve
- C Uniwersalny adapter "Proper Fit" z zaworami spiralnego ruchu powietrza
- D Zawór wydechowy (NIE OTWIERAĆ)
- E Wygodna, przylegająca Mask z bezpiecznym wydechowym zaworem

