



CE
2460



Single Patient Use



Zestaw do terapii aerozolowej ze smoczkiem zawiera: smoczek, przezroczysty zbiornik na lek (nebulizator), przewód powietrzny (rurka).

Instrukcja użycia

Niniejsza instrukcja użycia zawiera bardzo ważne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego użytkowania produktu. Przeczytaj bardzo uważnie przed użyciem produktu.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może mieć poważne konsekwencje, raniąc pacjenta lub personel medyczny.

Przekaż te instrukcje wszystkim użytkownikom.

Opis

Zestaw do terapii aerozolowej ze smoczkiem z pojemnikiem na lek wykonany z nieprzewodzącego materiału, do użytku przez jednego pacjenta.

Wskazany dla

Służy do podawania leków za pomocą aerozolu.

Przeciwwskazania

Nie znaleziono przeciwwskazań do stosowania w odniesieniu do zakresu stosowania wskazanego przez tę metodę.

Ostrzeżenia

Produkt nie może być ponownie użyty przez inną osobę, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. Sterylizacja lub stosowanie detergentów i środków dezynfekujących może powodować zatrzymywanie szkodliwych pozostałości i nieprawidłowe działanie produktu.

Środki ostrożności

Nadmierny nacisk na twarz pacjenta może powodować obrażenia uciskowe. Przed użyciem zestawu sprawdź, czy nie ma wad produkcyjnych. Zmiany w nosie, takie jak obrzęk, krzywa przegroda lub nadmiar śluzu, mogą wpływać na depozycję leku.

Instrukcje

1. Ten produkt jest przeznaczony do terapii aerozolowej.
2. Ten produkt musi być stosowany z polecenia lekarza.
3. Otwórz nebulizator i wprowadź przepisane leki.
4. Zamknij nebulizator.
5. Zamontuj nebulizator z elementami zawartymi w opakowaniu, jak pokazano na rysunku.
6. Podłącz jeden koniec rurki do nebulizatora, a drugi koniec do punktu zasilania sprężarki.
7. Upewnij się, że rurka jest dobrze podłączona.
8. Dostosuj przepływ zgodnie z zaleceniami.
9. Sprawdź, czy wszystko działa poprawnie.



Koo Medical Equipment (Shanghai) Co., Ltd. 100 Zhongde Road, Dakun Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201614, P.R.CHINA



Koo Europe S.r.l., Viale delle Industrie 5, 20020 Arese (MI), ITALY, Tel: +39 02 93589495. Fax: +39 02 93588408, www.koomedical.com

Dystrybutor w Polsce: Elektro-Oxygen Polska Sp. z o.o., 02-531 Warszawa, ul. Łowicka 50/15, tel. 228494514, fax. 228492016, www.fisiochamber.pl